
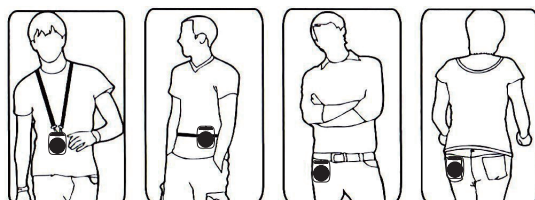


Sikkerhetsadvarsel:

- Ikke legg produktet og tilbehør i nærheten av brann eller andre varme omgivelser.
- Vennligst ikke legg produktet og tilbehør i nærheten av vann eller fuktige steder.
Unngå i tillegg å legge den i væske av frykt for at produktet og tilbehøret blir dempet.
- Vennligst ikke åpne produktet, batteriet eller tilbehøret.
Det kan forårsake eksplosjonsfare hvis batteriet erstattes feil. Unngå å sette batteriet i vann, brann eller i nærheten av varme omgivelser.
- Dette produktet må bruke strømadapteren (DC5V) for å lade.
Når det er ladet, bør du huske å trekke ut strømledningen eller strømstikk. Vi foreslår at du stopper andre operasjoner under lademodus. Hvis du trenger å bruke den, må du koble fra strømmen først.
- Vennligst slå av produktet hvis trådløst utstyr er forbudt (det kan føre til forstyrrelser av elektronisk utstyr).
- Vennligst slå av produktet i brennbare og eksplosive områder, følg samtidig instruksjonene for å unngå brannfare. Brennbare områdene inkluderer: bensinstasjon, brennbare eller kjemiske produkter, transport- og lagringsanlegg, områder merket med eksplosjonfarlig tegn osv.

Esken inneholder:

- 1 * Hovedenheten
- 1 * Sele/belte
- 1 * Kablet mikrofon
- 1 * USB kabel
- 1 * Brukermanual

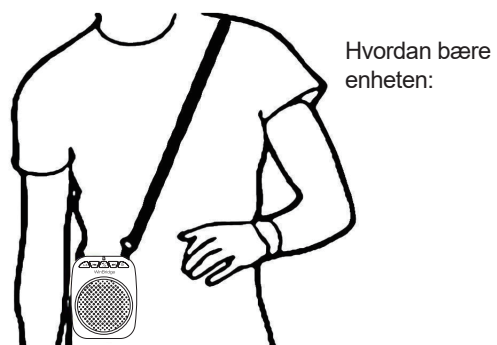

5. Originaltilbehør anbefales hvis noe må byttes ut.
6. Ikke-profesjonell tekniker har ikke lov til å demontere eller reparere produktet;
7. Ta kontakt med den lokale leverandøren hvis det er spørsmål til bruken eller behov for reparasjon.

Funksjoner:

1. WinBridge WB001 er lett, kompakt og portabel.
2. Utmerket for bruk i møter eller seminarer, passer også for guider.
3. Det er en mye bedre enhet - avrundede kanter, jevnere design, lading på datamaskinen, flere funksjoner.
4. WB001 er meget enkel i bruk, bare "plug and play"
5. Dette er et godt hjelpemiddel for personer med svak stemme.

Teknisk informasjon:

Effekt:	5W	Brukstid:	5~8 timer (mikrofonmodus)
Lithium battery:	1050mAh	Ladetid:	3~5 timer
Ladespenning:	DC 5V, 1A	Mål:	110mm* 88mm*46mm
Brukstid:	4~7 timer (musikkmodus)	Vekt	138g

Feilsøking:


1. Slå på strømbryteren, men forsterkeren har ingen lyd.
A. Ingen lys i indikatorlampen, det er tomt batteri, sett enheten til lading.
B. Indikatorlampen lyser: sjekk den kablede mikrofonen.
2. Stemmeforsterkeren har tydelig uling.
A. Bruk mikrofonen riktig: sett mikrofonen foran munnen, avstanden mellom mikrofon og forsterker skal være 60-70CM.
B. I et lite rom, skru ned volumet betraktelig for å unngå hyling.
C. Ikke pek mikrofonen mot høyttaleren.
3. Stemmeforsterker kan ikke slås på mens den lades.
A: Enheten kan ikke slå seg på mens den lades, så koble fra laderen og slå på igjen.

Husk:

1. Snakk rett inn i mikrofonen, og hold avstanden mellom stemmeforsterker og MIC lenger enn 60 cm, og unngå hyling.
2. Ikke sett inn eller koble til kontakten mere enn nødvendig for å unngå at kontakten blir løs eller får dårlig tilkobling.
3. Lad opp når batteriet har liten kapasitet.
4. Forsterkeren skal oppbevares på et tørt og ventilert sted, regn, vann, slag skal unngås.




WinBridge Brukermanual Stemmeforsterker WB001

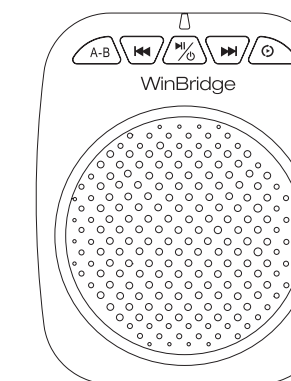

WB001

Bestilling.nr 1111600 Stemmeforsterker WB001
HMS 290313

Instruksjoner:

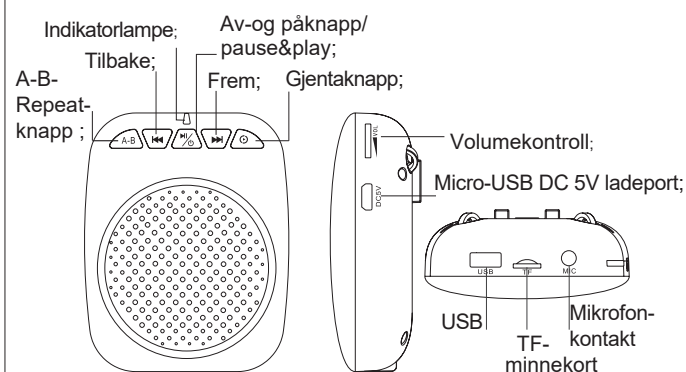


Applikasjoner:

1. Ta ut forsterkeren, fest midjebåndet til metallkrokene på begge sider; Fest den rundt livet eller heng på den over skulderen din, beltet er justerbart. Du kan også bruke spennen bak til å feste høyttaleren på linningen eller buksen.
2. Bruk hodetelefonmikrofonen og juster posisjonen, hold deg 1-2 cm unna munnen. Sett den andre enden av 3,5 mm-kontakten inn i lydforsterkerens mikrofonkontakt-port.

Note:

- ▶ Dette er en høyttaler med høy effekt, vennligst skru ned volumet til et minimum når du bruker det i et lite rom.
- ▶ Vær forsiktig med å få mikrofonen for nær høyttaleren, ellers gir den feedback, dette kan skade høyttaleren.

Trykk og hold "⏮" -knappen for å slå på eller av enheten. Ved minnekort- eller USB-avspillingsmodus vil den blå indikatorlampen blinke. Trykk kort på "⏮" -knappen for å pause og lampen lyser konstant. Et kort trykk igjen på "⏮" for å gå tilbake til normalmodus.

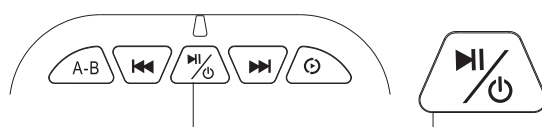


Ved avspilling i minnekort- eller USB-modus, trykk kort på "⏮" eller "⏭" -knappen for å velge forrige eller neste sang; Trykk og hold "⏮" eller "⏭" -knappen inne for å spole frem eller tilbake.



Under TF-kort / USB-spillermodus blinker blå indikator normalt; Kort trykk "⏮" knappen til en syklus, den blå indikatoren blinker raskt. Trykk kort igjen for å avbryte en syklus, høyttaleren begynner å bla hele syklusens blå indikator for å blinke normalt.




Under TF-kort / USB-spillermodus blinker blå indikator normalt; Kort trykk "⏮" knappen, Lyser den blå indikatoren konstant, kort trykk "⏮" knappen igjen, høyttaleren begynner å gjenta avspilling med blå indikator som blinker raskt. Avspillingen vil gå tilbake til det normale hvis du trykker kort "⏮" knappen igjen.

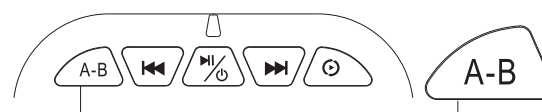

Hvordan lade høyttaleren.....

Koble ladekabelen til høyttalerens DC 5V-kontakt og koble USB-pluggen med en hvilken som helst 5V lader, strømbank eller til og med datamaskinen din for å lade høyttaleren. De fleste ladere i vårt daglige liv er 5V. Lader: rød indikator blinker; Fulladet: Rød indikator lyser konstant;

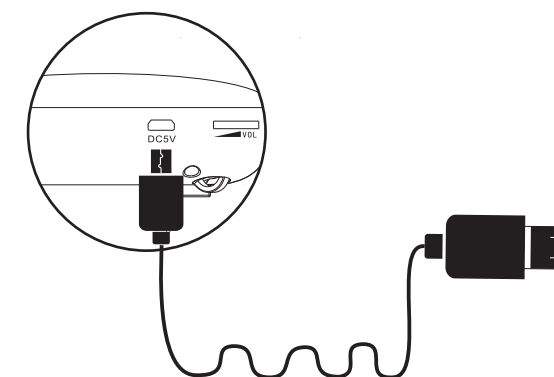

- helping people



info@cantec.no
http://www.cantec.no

